

Kurzanleitung

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest zur Eigenanwendung (kolloidales Gold) (Speichelproben)


Kurzanleitung



Vorbereitung

- Öffnen Sie Ihre Testpackung und überprüfen Sie den Inhalt.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.


Inhalt	Spezialflüssigkeit	Extraktions-Tupferkopf	Extraktions-Röhrchen
Flüssigkeit zum Trocknen des verpackten Röhrchens	1	1	1
Spezialer Extraktions-Tupferkopf	1	1	1
Extraktions-Röhrchen	1	1	1
Extraktions-Tupferkopf	1	1	1

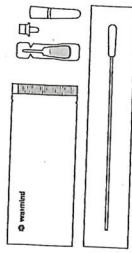

- Öffnen Sie den Beutel und legen Sie die Kassette auf eine saubere, trockene, flache Oberfläche. HINWEIS: Berühren Sie keine Teile auf der Innenseite der Karte.

Schritt 1. Ablauf der Probenentnahme

- Öffnen Sie die Tupferpackung und nehmen Sie den Tupfer heraus.
- Entnahme von Speichelproben: Drücken Sie die Zungenspitze gegen die untere Kieferwurzel, um den Speichel anzureichern. Bringen Sie den Oropharyngealtupfer für 40 Sekunden unter die Zunge, drehen Sie ihn 5 Mal und trinken Sie ihn vollständig.
- Öffnen Sie die Probenextraktionslösung
- Füllen Sie die Probenextraktionslösung in das Röhrchen

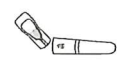


Schritt 2. Probenextraktion

- Mischen Sie die Lösung, indem Sie den Tupfer mindestens 10 Mal kräftig gegen die Seite des Röhrchens drehen und das Röhrchen 5 Mal von Hand zusammendrücken, damit die Probe auf dem Tupfer vollständig in dem Extraktionspuffer gelöst wird.
- Pressen Sie den Tupferkopf gut aus damit soviel Lösung wie möglich im Röhrchen bleibt.
- Entfernen Sie den Tupfer, schließen Sie die Abdeckung des Röhrchens und schwenken Sie das Röhrchen.



Schritt 4. Auswertung der Testergebnisse

- Interpretieren Sie die Testergebnisse nach 15-20 Minuten.

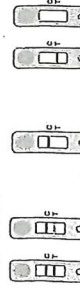

Positiv




Negativ



Ungültig

Schritt 3. Testverfahren

- Geben Sie 100µl (3 Tropfen) der Probe in die Vertiefung auf der Kassette.
- Warten Sie 15 Minuten.

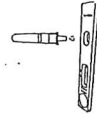

- Warten Sie 15 Minuten.

HINWEIS: Die Kassette darf während dieser Zeit nicht bewegt und/oder berührt werden.



Symbole

Verwendung in der Probenpackung	Sicherheitsmaßnahmen
REF	REF
LOT	LOT
Verfallsdatum	Herstellungsdatum
Nicht wiederverwenden	Zwischen 2 und 30 °C lagern
Von Bioabfall trennen	Trocknen lassen
Hersteller	EU-Bioabfall

Ein positives Testergebnis muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. Wenn Sie sich zu Beginn oder während einer Anzfi/Hausarzt oder das folgende Gesundheitsamt für eine Konsultation eines Arztes sollte keine medizinisch wichtige Entscheidung getroffen werden. Die Möglichkeit eines falsch-positiven sowie eines falsch-negativen Ergebnisses kann niemals ausgeschlossen werden. Sollten Sie ein negatives Ergebnis erhalten, aber trotzdem Symptome wie Husten, Fieber oder Schnupfen verspüren, empfehlen wir Ihnen, einen Arzt/Hausarzt zu konsultieren. Auch ohne Symptome und bei negativem Ergebnis sollten Sie sich bitte weiterhin an die geltenden Maßnahmen halten.

Wanhua Medical Co., Ltd.
 11th Floor, Wanhua Building, No. 100001001001, Zhongguo Road, Shanghai, China
 Tel: +86 21 64699999 Fax: +86 21 64699999
 20027, Henning, Germany